

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLICALL 20

Utripajoč telefonski in hišni zvonec




Slovenščina

AUDIOBM

geemarc™
Telecom SA


OPIS

Opis

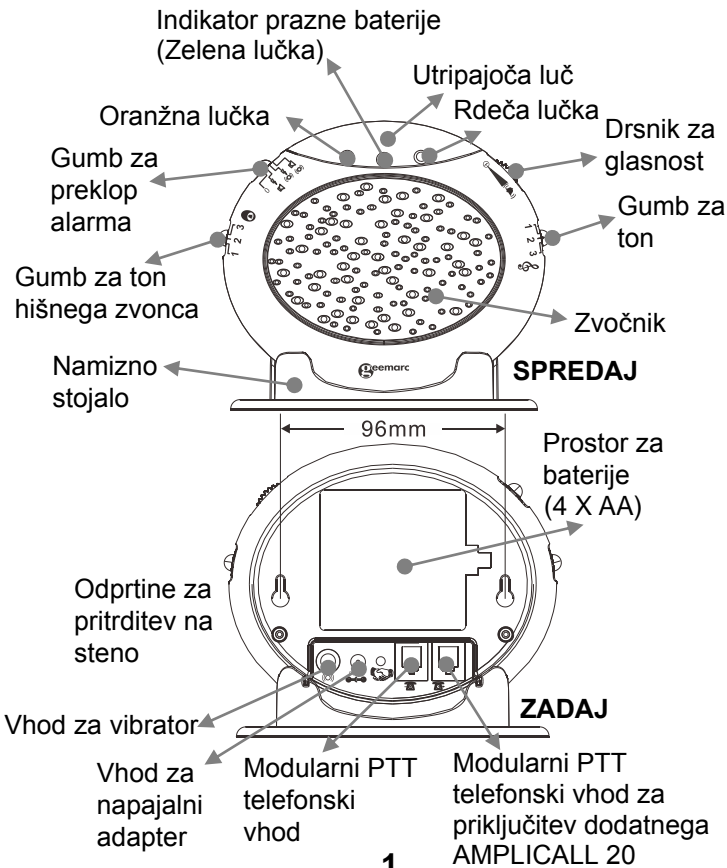

NAMESTITEV


Namestitev (glejte sliko)

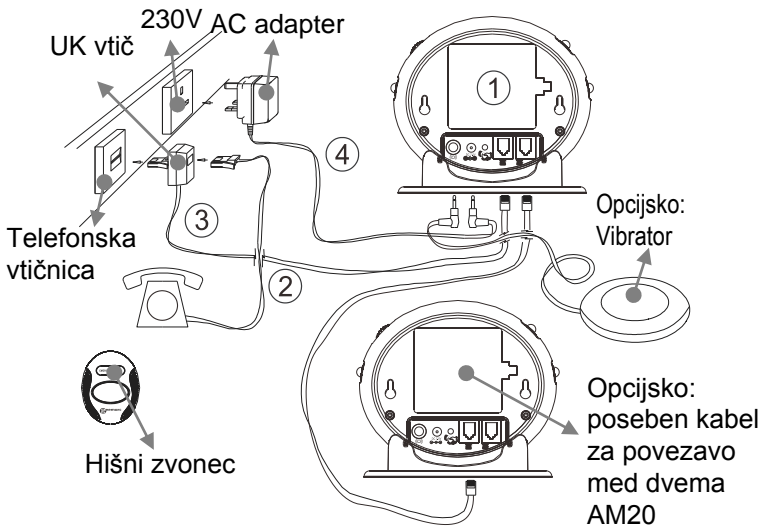

- 1 - Vstavite 4 AA baterije v prostor za baterije
- 2 - Povežite UK vtič z vašim telefonom ter z PTT vhodom na vašem Amplicall 20
- 3 - Povežite UK vtič s stensko PTT telefonsko vtičnico.
- 4 - Plug the power cable into the power adapter jack found at the rear of the Amplicall 20. Plug the adaptor into the mains supply at the wall (optional extra)

NAMESTITEV

Druga metoda povezovanja:

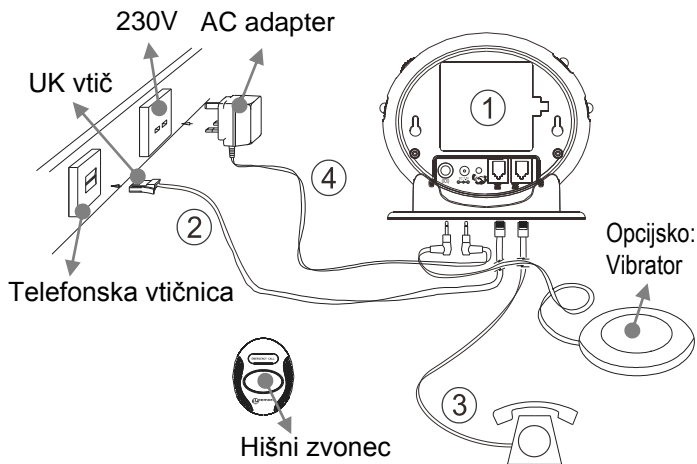


- 1) Vstavite 4 AA baterije v prostor za baterije
- 2) Prvi konec telefonskega kabla vklopite v Amplicall 20 drug konec pa vklopite v stensko telefonsko vtičnico
- 3) Povežite RJ11 kabel med Amplicall 20 in vašim telefonom.
- 4) Vklonite napajalni adapter v vtičnico za napajanje na zadnji strani Amplicall 20.

NAMESTITEV

Namestitev hišnega zvonca

1. Hišni zvonec lahko uporabljajo ljudje, ki so potrebni pomoči.
2. Hišni zvonec lahko namesite na vrata ali steno. Izvrtajte dve horizontalno vzporedni luknji med katerima naj bo razdalja 15mm. V izvrtane luknje namestite priložena nosilca in ju privijte. Čez luknji prilepite nalepko EMERGENCY CALL.

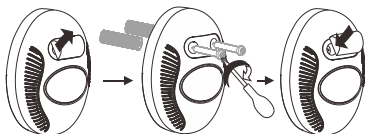

3. Hišni zvonec se lahko namesti tudi na vrata ali okno s pomočjo močnejšega lepilnega traku, ki se nahaja pod nalepko na hišnem zvoncu. Odstranite zaščitno nalepko na zadnji strani hišnega zvonca in ga prilepita na vrata ali okno.

Stenska namestitev

1. Izvrtajte dve horizontalni vzporedni luknji, med njima pa naj bo razdlija 96mm. Vijaka nato vstavite v izvrtani luknji in pustite, da iz stene gledata približno 5mm.
2. Zvonec obesite na nosilca in ga potisnite navzdol, da se ta zaskoči.

NAMESTITEV



Izbira alarma



Med alarmi, ki so na voljo lahko izbirate s pomočjo stikala za preklop alarma, ki ga lahko preklopite na naslednje pozložaje:

0 :brez alarma

 :aktivirano svetlobno utripanje in zvonjenje



 :aktivirano svetlobno utripanje in vibriranje
() (če imate vibrator)

 :aktivirano zvonjenje in vibriranje (če imate
() vibrator)

Drsnik za nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti telefonskega in hišnega zvonca lahko uporabite drsnik za glasnost.

Stikalo za ton (3 Položaji)

S stikalom za ton lahko nastavite ton zvonjenja.

Stikalo za ton hišnega zvonca

S stikalom za ton hišnega zvonca lahko izbirate med tremi različnimi toni zvonjenja.

NAMESTITEV

Menjava baterij glavne enote

Naprava potrebuje 4xAA baterije.

1. Odprite prostor za baterije.
2. Vstavite 4 x AA baterije v prostor za baterije.
3. Vratca za baterije zaprite.

Opomba: ko zasveti redča LED lučka je čas za menjavo baterij.

Med menjavo baterij iz naprave izklopite vse telefonske in napajalne kable.

Menjava baterij hišnega zvonca

Hišni zvonec ima priloženo 23A 12V baterijo. Baterija je priložena in vstavljena, tako, da je ob prvi uporabi Amplicall 20, ne potrebujete menjati.

Za menjavo baterij hišni zvonec odstranite z vrat ali zida. Nato odstranite pet vijakov na zadnji strani zvonca in odprite prostor za baterije. Baterije zamenjajte in hišni zvonec ponovno namestite na željeno mesto.

Opomba: Ne uporabljajte baterij za polnjenje. Ne uporabljajte praznih ali rabljenih baterij. Prazne baterije odlagajte na ustrezno mesto.

NAMESTITEV

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Amplicall 20 zveni tudi, ko ni nobenih dohodnih klicev in zveni samodejno. Vibrator vibrira konstantno ali samodejno. Svetlobna LED luč utripa konstantno ali samodejno.	<ol style="list-style-type: none">1) Preverite, če so baterije pravilno vstavljene.2) Preverite, če je napajalni adapter pravilno vklopljen.3) Napravo ugasnite za 10 min in jo nato ponovno vklopite.
Rdeča LED lučka za prazno baterijo samodejno utripa.	<ol style="list-style-type: none">1) Zamenjajte baterije.2) Napravo ugasnite za 10 min in jo nato ponovno vklopite.
Pri dohodnih klicih zvonec ne zveni.	<ol style="list-style-type: none">1) Preverite, če je napajalni adapter pravilno vklopljen.2) Preverite, če so baterije pravilno vstavljene.3) Preverite stikalo za glasnost.4) Preverite, če je telefonski kabel pravilno vklopljen.5) Preverite, če je stikalno za alarm pravilno nastavljen.

NAMESTITEV

<p>Pri dohodnih klicih vibrator ne vibrira.</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Preverite, če je vibrator pravilno vklopljen.2) Preverite, če je vhod za vibrator poškodovan.3) Preverite, če je stikalo za alarm na pravilnem položaju.
<p>Amplicall 20 ne zveni, ko nekdo pozvoni na hišni zvonec.</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Preverite, če na hišnem zvoncu zasveti rdeča lučka. V primeru, da ta sveti, zamenjajte baterije.2) Hišni zvonec ponovno povežite z Amplicall 20.3) Preverite ali je stikalo za preklon alarma na pravilnem položaju.

Dobavitelj za Slovenijo:

AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si

