

Čiščenje

Čistilni robčki



AUDIO BM čistilni robčki so posebej izdelani za vzdrževanje vseh vrst slušnih aparatov. Posamezno pakiranje je idealno tudi za potovanja. Robčki vsebujejo površinsko aktivno sredstvo, ki je zelo učinkovito proti ušesnemu maslu.

Čistilne tablete



Ušesno olivo položite v posodo v kateri je voda in ena čistilna tableta. Ušesno maslo se raztopi po približno 30 minutah namakanja. Sperite ušesno olivo in jo posušite z uporabo posebne AUDIO BM puhalke za zrak.

Priporočamo, da ušesno olivo v celoti očistite vsaj dvakrat na mesec.

Čistilni sprej



Le en pritisk je dovolj, da AUDIO BM čistilno sredstvo nanese na čopič; nežno podrgnite, nato previdno očistite površino. Po čiščenju obrišite z mehko in suho krpico.

Sušenje

Puhalka



AUDIO BM puhalke zagotovi popolno prehodnost zaušesne olive.

Sušilne kapsule



Slušni so aparati dnevno izpostavljeni potenju, vlagi, itd. Elektronske komponente lahko hitro oksidirajo. Za omejitev teh težav priporočamo uporabo AUDIO BM sušilnih kapsul.

Vsak večer, ko odstranite slušne aparate jih enostavno postavite v posodo za sušenje. Kapsula naj deluje preko noči. Naslednji dan bo vaš slušni aparat popolnoma suh.

Za zanesljivo delovanje slušnih so potrebne kakovostne baterije. Preverite visoko nemško kakovost baterij za slušne aparate, ki so vam po ugodni ceni na voljo v AUDIO BM slušnih centrih.

Aktivno sušenje

PerfectDry Lux



AUDIO BM PerfectDry Lux® je elektronska naprava za vzdrževanje in shranjevanje vseh vrst slušnih aparatov.

Vzdrževanje je zagotovljeno s kombinacijo:

- ventilatorja, ki zagotovi kroženje zraka in
- UV-C žarkov, ki poskrbijo za dezinfekcijo.

Kompleti



Na voljo so vam tudi različni kompleti, za še enostavnejšo nego in vzdrževanje čistoče slušnih aparatov in ušesnih delov. Tu predstavljamo elegantno AUDIO BM kozmetično torbico, v kateri je vse, kar potrebujete za osnovno vzdrževanje in nego zaušesnega slušnega aparata. Vsebino enostavno dopolnjujete po potrebi.

AUDIO BM
SLUŠNI APARATI