

GEEMARC

CLEAR SOUND[®]
HEAR THE DIFFERENCE

PhotoPHONE 100

Ojačan Foto ID Telefon



geemarcTM
Telecom SA

Slovenčina

AUDIOBM
SLUŠNI APARATI

PREDSTAVITEV

Vsebina paketa


Paket PhotoPHONE 100 vsebuje naslednje:

- 1 enota PHOTOPHONE 100
- 1 PHOTOPHONE 100 slušalka z navitim kablom
- 1 Kabel za telefonsko linijo
- 1 Navodila za uporabo




OPIS

Splošni opis

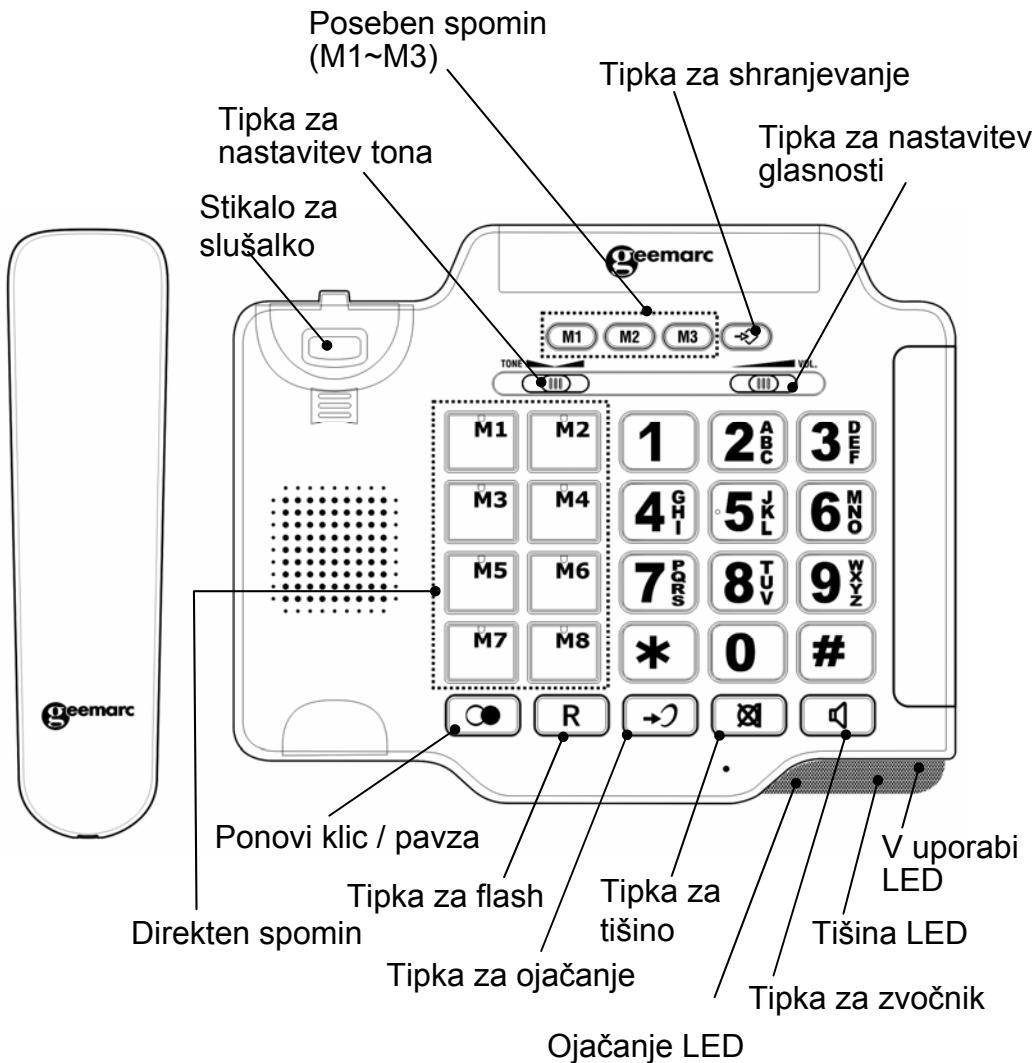

OPIS

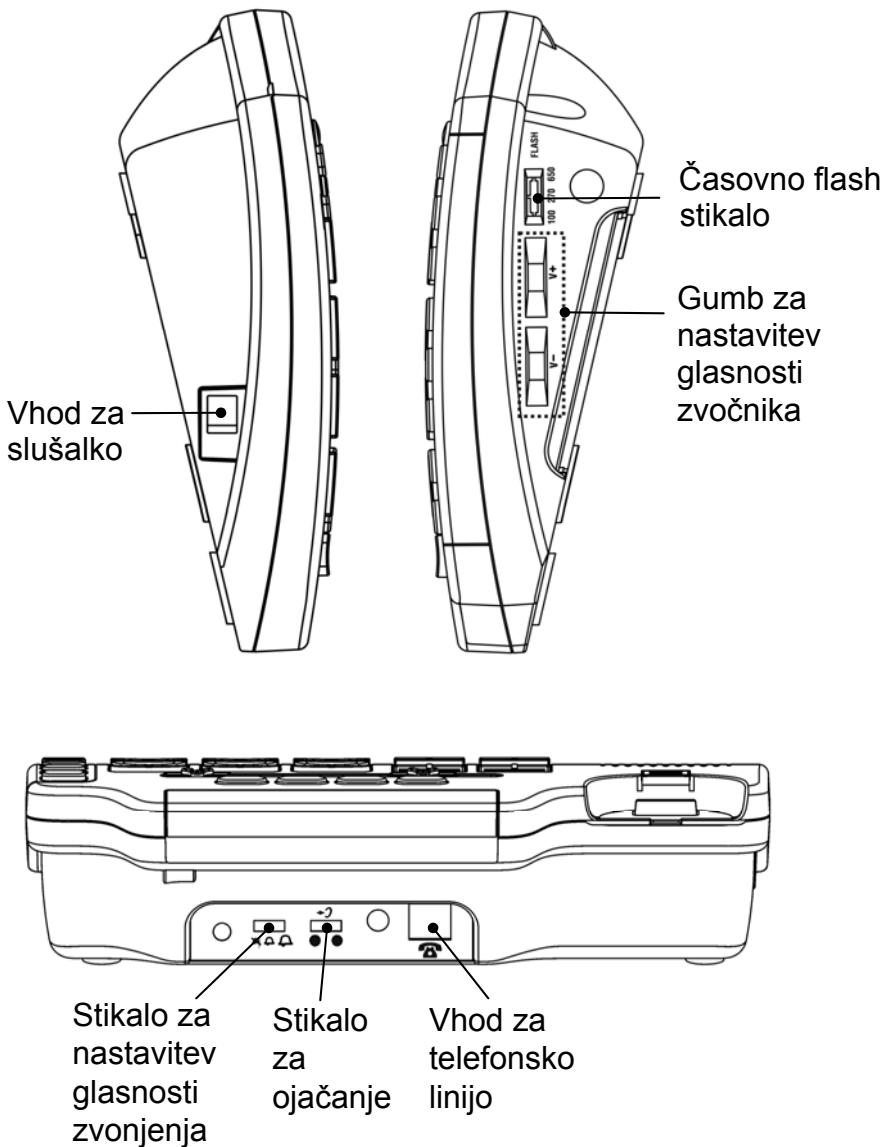

NAMESTITEV

Namestitev

Priključite naviti kabel na slušalko. Vklopite drugi konec navitega kabla na vhod, ki se nahaja na levi strani PHOTOPHONE 100 enote. Postavite slušalko na glavno enoto.

Vklopite kabel za telefonsko linijo v vhod, ki se nahaja na zadnji strani glavne enote, drugi konec pa vklopite v vtičnico za telefonsko linijo, ki se nahaja na steni.

NAMESTITEV

NAMEŠČANJE NA STENO


Potisnite stenski nosilec iz enote in ga obrnите za 180 stopinj. Nato ga potisnite nazaj tako, da je kljuka usmerjena navzgor (glejte sliko 1). Tako boste zagotovili, da telefonska slušalka ne pade s telefonske enote, ko bo ta nameščena na steno.

V steno namestite dva vijaka (nista priložena) z medsebojno razdaljo 80mm in poskrbite, da sta vijaka v vertikalni liniji.


Postavite telefonsko enoto na vijaka ter jo potisnite nazvdol tako, da se ta zaskoči (glejte sliko 2).

Obrnite kljukico na položaju za slušalko tako, da lahko slušalko položite na telefonsko enoto.

Slika 1

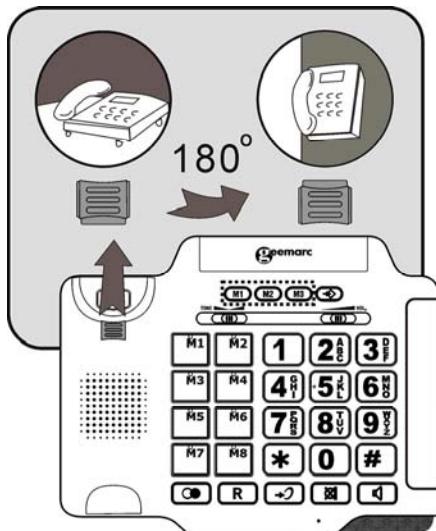

Slika 2

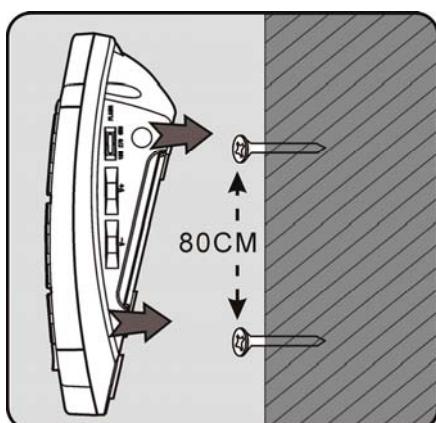

NASTAVITVE

Nastavitev zvonjenja

Stikalo, ki se nahaja na zadnji strani enote PHOTOPHONE 100 omogoča nastavitev glasnosti zvonjenja   .

Nastavitev HI (maksimalna glasnost), LO (najnižja glasnost) ali OFF (če ne želite, da bi vas zvonjenje motilo).


NASTAVITVE

Nastavitev glasnosti pogovora in tona

Glede na slušne potrebe lahko med klicanjem nastavljate glasnost pogovora in ton.

Drsna tipka za glasnost se  VOL. nahaja na zgornji strani telefonske postaje. Z njo lahko nastavljate glasnost pogovora. Glasnost se lahko nastavlja med 0-15dB.

Tipka **AMPLIFY** na  telefonski postaji omogoča dodatno ojačenje do 15dB. Posledično bo omogočena nastavitev glasnosti od 15-30dB. Ko je funkcija ojačenja vključena, sveti tudi Amplify LED lučka.

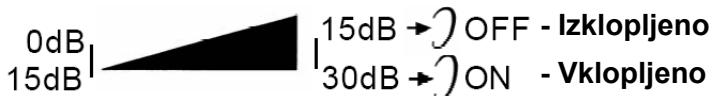

Privzeta nastavitev za ojačanje

Amplify (ojačanje), ki  ON /OFF se nahaja na zadnji strani telefonske enote omogoča privzeto nastavitev ojačanja nastavite, da je ta prisotna ob vsaki uporabi telefona.

AMPLIFY ON/OFF Stikalo v ON Položaju

Dodatne nastavitev ojačanja in tona so samodejno aktivirane vsakič, ko uporabite telefon. Med uporabo telefona bo svetila Amplify LED.

S stiskom Amplify tipke med  klicanjem boste izključili dodatne nastaviteve za ojačanje in ton. Vseeno pa boste lahko nastavljali glasnost slušalke z drsno tipko za glasnost.

NASTAVITVE

AMPLIFY ON/OFF Stikalo v OFF Položaju

Dodatne nastavitev ojačenja in tona so izključene vsakič, ko uporabite telefon. Med uporabo telefona Amplify LED lučka ne bo svetila.

S stiskom Amplify tipke med → klicanjem boste vključili nastavitev za ton in dodatno ojačanje. LED lučka Amplify bo začela svetiti. Če boste tipko za ojačanje pritisnili ponovno, → se bodo funkcije za dodatno ojačanje in ton ponovno izključile. LED lučka se bo prav tako prenehala svetiti.

Nastavite za ton

V primeru, da je ojačana glasnost klicanja, se lahko nastavi tudi ton. TONE  Lahko nastavite in povdarite nizke frekvence ali visoke frekvence. Za nastavitev tona uporabite drsno tipko za ton, ki se nahaja na vrhu telefonske postaje.

Nizki toni - Bass maksimum - +10db max 

Treble - Visoki toni +10db max - maksimum

Opomba: Nastavite za ton ne bodo na voljo, če bo glasnost klicanja nastavljena na normalen nivo.

NASTAVITVE

Nastavitev glasnosti zvočnika

V prostoročnem načinu lahko nastavljate glasnost zvočnika z uporabo tipk za glasnost V+ in V-, ki se najahata na desni strani telefona.

UPORABA TELEFONA

Klicanje

V roke vzemite slušalko.

Ko boste zaslišali pozivni ton, vnesite klicno številko na tipkovnici.

Za preknitev klica preprosto odložite slušalko na postajo.

Klicanje - prostoročno

Pritisnite tipko  da zaslišite pozivni ton.

Vnesite klicno številko na tipkovnico.

Za prekinite klica preprosto ponovno pritisnite tipko 

Za aktiviranje prostoročnega načina med klicanjem, pritisnite **SPEAKER** tipko  in istočasno položite slušalko na telefonsko postajo.

Za prekinitev prostoročnega načina dvignite telefonsko slušalko.

Opomba: Med uporabo prostoročnega načina lahko govori le ena oseba in ne dve hkrati. Preklop med mikrofonom in slušalko je samodejen. Preklop je odvisen od nivoja glasnosti dohodnega klica in mikrofona. Tako je pomembno, da pri uporabi prostoročnega načina v bližini telefona ni drugih hrupnih zvokov, kot je naprimjer glasba, saj bo le-ta motila pogovor.

UPORABA TELEFONA

Sprejemanje klica

Med prejemanjem dohodnega klica, telefon zvoni, utripa pa tudi LED lučka za dohodne klice.

Dvignite slušako in pričnite pogovor

Za prekinitvev klica slušalko odložite na telefonsko postajo

Sprejemanje klica - prostoročno

Pritisnite  za uporabo prostoročnega načina

Za prekinitvev klica pristignite tipko 

Zadnja klicana številka

Dvignite slušalko ali pristignite 

Pritisnite  za klicanje zadnje klicane številke

UPORABA TELEFONA

Tiki način

Če želite lahko opravite zaseben pogovor v prostoru, brez da bi ga slišal sogovorec na telefonu. Sogvorca na telefonu boste lahko še vedno slišali, on pa vas ne bo slišal.

Za vklop tihega načina med klicanje pristignite tipko **MUTE**  (LED lučka se bo vklopila). Vaš sogovorec vas tako ne bo več slišal.

Za nadaljevanje pogovora ponovno pristignite tipko  LED lučka za tiki način se bo ugasnila.

Trajanje klica

Vaš telefon samodejno meri trajanje vsakega odhodnega klica. Čas je prikazan med klicanjem in nekaj sekund po končanem klicu.

Uporaba slušnih aparatov

Telefon je kompatibilen s slušnimi aparati. Na slušnih aparativih vklopite tuljavico T.

Flash Signal

FLASH tipk lahko **R** uporabite za posebne funkcije kot so čakajoči klic (v primeru, da ga ponuja vaš operater) ali prevezava odhodnih klicev.

SPOMIN

Shranjevanje števil v spomin

Obstaja 11 tipk za shranjevanjev spomin (**M1**, **M2** in **M3** ter 8 foto klicnih tipk). Pod foto tipke lahko shranite slike vaših kontaktov. To je lahko koristno, če pozabite telefonske številke ali imena kontaktov.

Dvignite slušalko.

Pritisnite  Vnesite številko, ki jo želite shraniti.
do 32 znakov). Po potrebi lahko uporabite tipko  za dodajanje presledkov.

Pritisnite željeno spominsko tipko (**M1**, **M2** in **M3** ali eno od osmih foto spominskih tipk)

Ponovno pritisnite  in telefonska številka bo shranjena na spominsko lokacijo, ki ste jo izbrali.

Shranjevanje nove številke v zasedeno spominsko lokacijo bo samodejno zbrisalo prejšnjo številko.

Klicanje številke iz spomina

Dvignite slušalko.

Pritisnite željeno spominsko lokacijo (**M1**, **M2** in **M3** ali eno od osmih 8 foto spominskih tipk)

Telefonska števila bo samodejno klicana.

ODPRAVLJANJE NAPAK

PHOTOPHONE100 ne zvoni

- Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo pravilno vklopljen in nepoškodovan
- V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telefon ali premaknite ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
- Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.
- Prepričajte se, da zvonjenje ni izklopljeno

Ni pozivnega tona

- Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo pravilno vklopljen in nepoškodovan
- V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telefon ali premaknite ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
- Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.

VARNOSTNA OPOZORILA

Splošno

Naprave ne razstavljajte. Za popravila kontaktirajte dobavitelja.

Čiščenje

Čiščenje

Odklopite telefon. Očistite telefon z mehko krpico. Poskrbite, da so polnila postaja in polnilni kontektorji čisti. Nikoli ne uporabljajte polirnih čistil ali močnih kemičnih čistil - ta lahko poškodujejo površino ali elektronsko vezje v notranjosti naprave.

Varnost

Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

Poskrbite, da je v okolini telefona vedno svež pretok zraka.

Ne postavljajte katerega koli dela tega produkta v vodo. Ne uporabljajte naprave v vlažnih zaprtih prostorih kot je kopalnica itd.

Naprave ne izpostavljajte ognju ali drugim nevarnim okoliščinam.

Telefon v času neviht izklopite, saj udarec strele lahko poškoduje vaš telefon. Garancija ne krije poškodb udarca strele.

Telefon je oblikovan in izdelan, da deluje na temperaurah od 5°C do 45°C.



Dobavitelj za Slovenijo:

AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si